

**FICHA TÉCNICA**  
**MEPENTOL<sup>®</sup> LECHE**

**BAMA - GEVE**



# MEPENTOL<sup>®</sup> LECHE

**Prevención y Tratamiento de Úlceras de la Extremidad Inferior en los estadios iniciales.**

**Prevención y Tratamiento de Úlceras por Presión de Estadio I y II**

MEPENTOL LECHE es una emulsión especialmente formulada para la prevención y tratamiento de úlceras de la extremidad inferior en los estadios iniciales.

Desarrollada a partir de la experiencia obtenida con Mepentol en la prevención y tratamiento de úlceras por presión de estadio I y II, MEPENTOL LECHE cuenta con las características necesarias para dar respuesta a los requerimientos más específicos de la prevención y tratamiento de úlceras de la extremidad inferior en los estadios iniciales.

Además, su especial formulación en emulsión hidratante permite la utilización de medias compresoras inmediatamente después de su aplicación.

## **COMPOSICIÓN:**

Ácidos grasos hiperoxigenados, *Mimosa tenuiflora*, *Aloe barbadensis*, excipientes.

## **INDICACIONES Y PROPIEDADES:**

MEPENTOL LECHE está indicado en la prevención y tratamiento de úlceras de la extremidad inferior en los estadios iniciales (venosas, arteriales y pie diabético) y en la prevención y tratamiento de úlceras por presión de estadio I y II.

El uso continuado de MEPENTOL LECHE reduce la frecuencia de recidivas, características de las úlceras de la extremidad inferior.

Los Ácidos grasos hiperoxigenados que integran su formulación, obtenidos por un particular proceso de hiperoxigenación: favorecen la renovación de las células epidérmicas mejorando la resistencia de la piel y facilitando la cicatrización; restauran el film hidrolipídico evitando la deshidratación cutánea; crean una barrera antimicrobiana que protege la zona ulcerada de agentes externos y mejoran la microcirculación sanguínea; evitan el daño causado por un aumento de los radicales libres, gracias a su actividad antioxidante.

MEPENTOL LECHE contiene además, *Mimosa tenuiflora*, que favorece el crecimiento epitelial y *Aloe barbadensis* que proporciona un efecto hidratante y lenitivo.

## **GARANTÍA DE CALIDAD**

Marca CE IIb

### **FORMA Y PRESENTACIONES:**

MEPENTOL LECHE se comercializa en tres presentaciones, en un cómodo frasco dosificador de PET opaco con sistema de cierre hermético inviolable que le garantiza mayor seguridad:

- **MEPENTOL LECHE** emulsión 20 ml.
- **MEPENTOL LECHE** emulsión 60 ml.
- **MEPENTOL LECHE** emulsión 100 ml.
- **MEPENTOL LECHE** emulsión 200 ml.

### **MODO DE EMPLEO:**

**Prevención de Úlceras por Presión y Úlceras de la Extremidad Inferior y Tratamiento de Úlceras por Presión de Estadio I:** Después de haber efectuado las curas de limpieza habituales, aplicar MEPENTOL LECHE 2 ó 3 veces al día, sobre las zonas de riesgo o afectadas por la úlcera, extendiendo el producto con las yemas de los dedos.

Acompañar el uso de MEPENTOL LECHE de cambios posturales y otras prácticas de prevención y cuidados generales, así como seguir las medidas higiénico-posturales recomendadas, puede evitar la formación de úlceras en la piel.

**Tratamiento de Úlceras por Presión de Estadio II y Úlceras de la Extremidad Inferior en los estadios iniciales:** Después de haber efectuado las curas de limpieza habituales, aplicar directamente MEPENTOL LECHE sobre la úlcera, o sobre una gasa estéril, que se aplica después sobre la úlcera. Cubrir la úlcera con la ayuda de un vendaje apropiado. Repetir la aplicación 2 ó 3 veces al día hasta la completa cicatrización.

### **PRECAUCIONES DE USO:**

**En caso de presentarse excesivo enrojecimiento de la piel se aconseja utilizar Mepentol solución.**

**El personal sanitario o cuidador que aplica MEPENTOL LECHE debe adoptar las normas y precauciones mínimas de una estructura sanitaria (por ejemplo el uso de guantes).**

Se recuerda además que, el producto:

1. Es de uso externo
2. Debe mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños
3. No utilizar si el envase está estropeado o manipulado
4. Conservar por debajo de 30°C.
5. No debe ser utilizado después de la fecha de caducidad.

### **FABRICANTE:**

Medichem, S.r.l. Via Verona, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio. ITALIA  
Tel. +39 02.92590281 – Fax 02/92148964

### **DISTRIBUIDOR:**

Bama-Geve, S.L.U. Avda Diagonal, 490 – 08006 Barcelona. ESPAÑA  
Tel. +34 93.415 48 22 – Fax +34 93 415 37 92