

ALLEVYN[®] ADHESIVE, apósito hidrocélular adhesivo.



Características

- **Adhesivo de alta tolerancia cutánea.**
- **Nueva forma más anatómica**, mejora el confort.
- **Comformable**, fácilmente adaptable a cualquier zona del cuerpo.
- **No se adhiere al seno de la lesión.**
- **Elevada capacidad de absorción gracias a su capa central.**
- **Promueve la cicatrización de la lesión.**
- **Bordes sellados y con forma redondeada**, protege frente a fugas de exudado y proporciona mayor adaptabilidad.
- **Película exterior es impermeable**, actúa como barrera bacteriana previniendo la contaminación de la lesión.
- **Minimiza el riesgo de maceración de la piel.**
- **Suave y acolchado**, gran confort para el paciente.
- **Mínimos cambios de apósito**, puede permanecer en la lesión hasta 7 días.
- **Fácil de usar y retirar.**

Descripción

Apósito con estructura trilaminar compuesto por una capa adhesiva en contacto con la herida, otra central hidrocélular suave y altamente absorbente y una externa permeable al vapor de agua que actúa de barrera bacteriana e impermeable, ofrece una barrera física contra líquidos, partículas y contaminantes microbianos.

Modo de acción

ALLEVYN[®] ADHESIVE absorbe el exceso de exudado al mismo tiempo que mantiene un entorno húmedo adecuado para facilitar el proceso de cicatrización.

La elevada capacidad de absorción se debe a la capa central formada por hidrocélulas de poliuretano, y gracias a las partículas de polietilenglicol que contiene, se consigue una rápida absorción inicial.

El exudado se absorbe primero por capilaridad y posteriormente por osmosis pasando el fluido desde los espacios intercelulares hacia el interior de las hidrocélulas. La película exterior es un film impermeable que actúa como barrera bacteriana y a fluidos por lo que previene la lesión de posibles contaminaciones.

ALLEVYN ADHESIVE está especialmente diseñado para su utilización en lesiones que por su ubicación requieran un apósito adhesivo. El adhesivo se adhiere a la piel sana pero no al seno de la lesión y ha demostrado ser de bajo riesgo ante la irritación cutánea.

Indicaciones

Cicatrización de heridas por segunda intención crónicas o agudas con niveles de exudado de moderado a alto: úlceras por presión, úlceras de pierna, heridas infectadas, úlceras de pie diabético, heridas malignas, heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, zonas donantes, úlceras fúngicas.

Instrucciones de uso

1. Limpiar la lesión según los procedimientos habituales.
2. Seleccionar el tamaño del apósito adecuado.
3. Preparar y limpiar la piel periulceral secando cualquier exceso de humedad. Para asegurar el contacto con la úlcera, deberá recortarse el exceso de vello alrededor de la misma, si fuera necesario.
4. Retirar el papel protector del apósito ALLEVYN Adhesive.
5. Colocar el apósito sobre el centro de la herida, situando la cara de color blanco en contacto con la herida y la rosa en el exterior. Alisarlo encima de la lesión y retirar el papel protector restante.
6. ALLEVYN Adhesive puede cortarse, especialmente para la curación de lesiones en rodillas, codos y otras zonas.

Composición

Película exterior: Film de poliuretano.

Capa central: Capa hidrocélular de poliuretano y polietilenglicol (PEG).

Capa de contacto: Capa de poliuretano microperforada.

Masa adhesiva: Acrílica.

Especificaciones técnicas

Capacidad total de absorción: mín. 35 g/cm².

Extensibilidad: máx. 1,9 N/cm.

Capacidad de absorción: mín. 30 g/cm².

Permeabilidad: mín. 80 g/cm².

Permeabilidad al vapor de agua: 1000 – 3500 g/m² 24 horas.


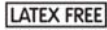





ALLEVYN[®] ADHESIVE, apósito hidrocélular adhesivo.

Tamaño apósito	Superficie activa absorbente capa hidrocélular
7,5 x 7,5 cm (56,3 cm ²)	5 x 5 cm (25,0 cm ²)
12,5 x 12,5 cm (156,3 cm ²)	10 x 10 cm (100,0 cm ²)
15 x 15 cm (225 cm ²)	12,5 x 12,5 cm (156,3 cm ²)
17,5 x 17,5 cm (306,3 cm ²)	15 x 15 cm (225,0 cm ²)
22,5 x 22,5 cm (506,3 cm ²)	20 x 20 cm (400,0 cm ²)

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Unidad mínima de venta	Código EAN	Código Nacional
66000043	ALLEVYN ADHESIVE 7,5 cm x 7,5 cm	10	10	5000223415570	
66000044	ALLEVYN ADHESIVE 12,5 cm x 12,5 cm	10	10	5000223415587	
66000349*	ALLEVYN ADHESIVE 12,5 cm x 12,5 cm	3	3	8470004833133	483313
66000777*	ALLEVYN ADHESIVE 15 cm x 15 cm	3	3	8470004918373	491837
66000045	ALLEVYN ADHESIVE 17,5 cm x 17,5 cm	10	10	5000223415594	
66000046	ALLEVYN ADHESIVE 22,5 cm x 22,5 cm	10	10	5000223416799	

* Reembolsable por la Seguridad Social

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 CE nº CE 00356 Clase CE IIb, estéril Smith & Nephew, S.A.U ISO 9001:2008 			 3 años  	 Smith & Nephew Medical Limited Hull HU3 2BN England Distribuidor Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

 No contiene látex	 Producto esterilizado por irradiación
 Caducidad	 No reutilizar
 Manténgase en lugar seco	 Temperatura de almacenamiento
 No exponer el producto a la radiación solar	 No utilizar si el envase está abierto o dañado
 Fabricante	

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.U
 Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)
 Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 70
 A-28123297