

# Biatain® Soft-Hold

– Absorción Superior para heridas en zonas difíciles de vendar



Biatain Soft-Hold es un apósito de espuma de poliuretano suave y adaptable.

- Espuma 3D para una Absorción Superior <sup>1,3</sup>
- Capa adherente de parafina aplicada en lazos Silky-Loop
- Minimiza el riesgo de maceración o fugas de exudado<sup>1</sup>
- Permanece más tiempo en la herida
- Apósito suave y flexible <sup>4,5</sup>



## Utilización

Biatain Soft-Hold puede ser aplicado en un amplio rango de heridas exudativas, incluyendo úlceras vasculares, úlceras por presión pie diabético, quemaduras de segundo grado, zonas donantes, heridas postquirúrgicas o abrasiones. Biatain Soft-Hold puede ser usado en combinación con terapia compresiva.



# Biatain® Soft-Hold

Biatain Soft-Hold es un apósito de espuma de poliuretano suave y adaptable, que absorbe y retiene el exudado. <sup>1,2</sup> Esto asegura un equilibrio del nivel de humedad, óptimo para el proceso de cicatrización de heridas exudativas. <sup>7,8</sup>



## Espuma de poliuretano 3D única, para una Absorción Superior.

Cuando entra en contacto con el exudado, la estructura 3D de la espuma Biatain se adapta a la forma del lecho de la heridas, para una Absorción Superior, incluso bajo compresión.<sup>1,3</sup> Minimiza el riesgo de maceración o fugas de exudado.

## Capa autoadherente de parafina, aplicada en lazos Silky-Loops.

Los lazos de parafina proporcionan una sujeción idónea para facilitar la aplicación del apósito en aquellos casos en los que se va a aplicar un vendaje.

## Larga duración

Gracias a su Absorción Superior, los apósitos Biatain pueden permanecer en la herida durante más tiempo. Estudios disponibles demuestran que Biatain es una solución coste efectiva, que puede permanecer sobre la lesión hasta 7 días.<sup>6,8</sup>

## Apósito suave y flexible


Biatain Soft-Hold es un apósito suave y flexible, muy comfortable para el paciente.

## Modo de acción

La estructura única de la espuma 3D, absorbe el exudado verticalmente y atrapa los fluidos en su estructura, separándolo de la herida, manteniendo el nivel adecuado de humedad para un óptimo proceso de cicatrización

## Composición

Biatain Soft-Hold es un apósito de espuma de poliuretano suave y adaptable, con una cubierta semipermeable, es decir, impermeable a líquidos y barrera bacteriana, a la vez que es permeable a gases.

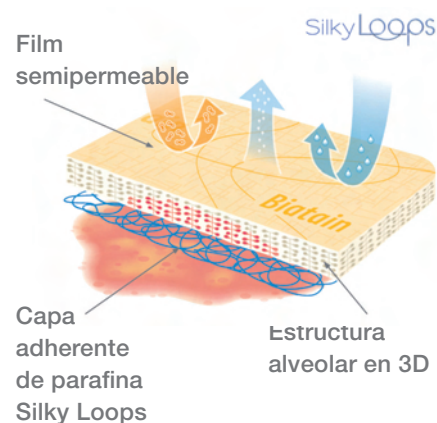

## Biatain® Soft-Hold

Ref	Medidas	Presentación
3470	10 x 10 cm	C/ 5 unidades
3472	10 x 20 cm	C/ 5 unidades
3475	15 x 15 cm	C/ 5 unidades

1. Andersen et al. Ostomy/Wound Management 2002;(48)8:34-41
2. Thomas et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf
3. Reitzel et al. EWMA 2008
4. Jorgensen et al. EWMA 2008
5. Vogensen. British Journal of Nursing 2006;15(21):1162-65
6. Bale et al. EWMA 2002
7. White R and Cutting KF. Modern exudate management: a review of wound treatments. WorldWideWounds 2006.
8. Romanelli et al. Exudate management made easy. Wounds International 2010;1(2).