


Ficha técnica

ACTICOAT[◇], barrera antimicrobiana

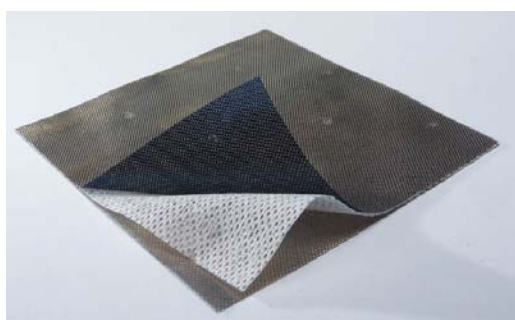

No contiene látex

Descripción

Apósito que se compone de tres capas: una capa absorbente interior, a ambos lados de la cual se sitúan dos mallas de polietileno de alta densidad y poco adherentes recubiertas de plata. La Plata Nanocristalina protege la herida de la contaminación bacteriana mientras que la capa absorbente interior ayuda a mantener un ambiente húmedo en la herida.

Modo de acción

La Plata Nanocristalina de ACTICOAT actúa de barrera antimicrobiana, eliminando en sólo 30 minutos un amplio espectro de bacterias.

ACTICOAT es una eficaz barrera contra más de 150 patógenos, incluidos gram positivos, gram negativos y hongos patógenos. Es también una eficaz barrera contra bacterias resistentes a antibióticos, tales como Pseudomonas, Staphylococcus aureus Meticilin resistentes (MRSA) o Enterococcus Vancomycin resistentes (VRE).

La capa interior absorbe el exudado y retiene la humedad manteniendo el ambiente húmedo óptimo para una rápida cicatrización.

Indicaciones

ACTICOAT está indicado como barrera de protección antimicrobiana en heridas de espesor parcial y total, como úlceras por decúbito, úlceras venosas, pie diabético, quemaduras, zonas donantes o zonas receptoras de injertos. ACTICOAT puede aplicarse en heridas infectadas. Cuando el producto se aplique en heridas infectadas, éstas deben ser inspeccionadas y tratadas según el protocolo clínico local.

Características

- Barrera antimicrobiana con Plata Nanocristalina
- Barrera efectiva a la penetración bacteriana
- Amplio espectro de actividad antimicrobiana
- Larga duración: permanece activo al menos 3 días
- Actúa rápidamente
- Fácil de aplicar y retirar
- Previene y reduce las infecciones
- Puede aplicarse en heridas de gran superficie
- Baja adherencia
- Baja toxicidad

Instrucciones de uso

1. Retirar ACTICOAT del envase de manera aséptica
2. Cortar en la forma adecuada si fuera necesario
3. Mojarlo con agua estéril (no usar solución salina)
4. Aplicar el apósito en la herida con el lado azul sobre ésta
5. Sujetar el apósito ACTICOAT en su lugar utilizando un apósito secundario apropiado o un vendaje de compresión, que mantenga un ambiente húmedo adecuado
6. Mantener el apósito húmedo
7. Examinar el apósito diariamente y cambiarlo en función de la cantidad de exudado y de la condición de la herida.

Composición

Capa interior absorbente: lámina no tejida de poliéster / rayón

Capas externas: mallas de polietileno de alta densidad recubiertas de una aleación binaria de plata y oxígeno. El recubrimiento de las mallas de polietileno se realiza mediante un proceso especial de deposición física en vapor, mediante el cual se consigue un material muy poroso formado por cristales más pequeños (250 nm), que permiten una mayor exposición al agua.

Almacenaje

Mantenerlo lejos de la luz, en un lugar seco, aireado y a temperatura inferior a 25°C.

Temperatura máxima de exposición: 50°C

No utilizar si el envase está dañado. Un solo uso. No reesterilizar.

ACTICOAT[◊], barrera antimicrobiana

Esterilización

Rayos gamma

Caducidad

3 años

Clase CE

III, estéril

Fabricante

Smith & Nephew Medical Limited

P.O.Box 81 Hessle Road

Hull HU 2BN - Inglaterra

Presentación

Código de producto	Descripción	Unidades / envase	Envases / embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN-13
66000791	ACTICOAT 10cm x 10cm	12 apósitos/caja	20 envases	12 unidades	5000223449766
66000792	ACTICOAT 10cm x 20cm	12 apósitos/caja	20 envases	12 unidades	5000223449797
66000793	ACTICOAT 20cm x 40cm	6 apósitos/caja	20 envases	6 unidades	5000223449827
66000794	ACTICOAT 40cm x 40cm	6 apósitos/caja	5 envases	6 unidades	5000223449858
66000795	ACTICOAT 10cm x 120cm	6 apósitos/caja	4 envases	6 unidades	5000223449889

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A.

Fructuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60

Fax. Atención cliente: 902 30 31 70

EducaciónAWM@smith-nephew.com

www.smith-nephew.com

◊ Marca registrada de Smith & Nephew