

ACTISORB® PLUS 25

Malla antimicrobiana de nylon y carbón activado con plata

¿QUÉ ES?

ACTISORB® PLUS 25 es un apósito bactericida compuesto por una malla de carbón activado puro impregnado con plata metálica, contenido en el interior de una malla termosellada de fibras de nylon sin tejer.

¿QUÉ HACE?

ACTISORB® PLUS 25 reduce en un corto espacio de tiempo de manera eficaz y segura la carga bacteriana y de microorganismos en la herida, siendo el producto ideal tanto para la limpieza de la herida, como la prevención y el tratamiento local de la infección.

El uso de este apósito genera un amplio número de beneficios:

- ❖ La malla de fibras de nylon sin tejer favorece por capilaridad el drenaje de la herida, favoreciendo así la revascularización y descontaminación de ésta, y movilizand las bacterias hacia el interior del apósito. Esta funda además evitará la fuga de partículas de carbón activado o plata hacia el lecho de la lesión, dotando así a este apósito de un mecanismo de acción físico, y ejerciendo la acción bactericida en el interior de su estructura de carbón activado con plata.
- ❖ El carbón activado ejerce una acción de limpieza y descontaminación al adsorber y retener en su estructura la materia orgánica como los microorganismos, las endotoxinas bacterianas y los detritus metabólicos, favoreciendo la actividad bactericida de la plata en este entorno, y con ello la evolución positiva de la herida y la reducción de la carga bacteriana.
- ❖ La plata metálica ejerce su acción bactericida dentro de la estructura del Carbón Activado, por lo que no entra en contacto con la herida, evitando cito-toxicidad y efectos adversos; razón única por la que este apósito está recomendado para la limpieza de la herida y la prevención o el tratamiento de la infección indistintamente, y de manera independiente a la duración del tratamiento.
- ❖ Gracias a su eficaz acción drenante, bactericida y descontaminante, reduce eficazmente el volumen de exudado de la herida y el mal olor.

ACTISORB® ha demostrado ser eficaz frente a más de 150 microorganismos clínicamente relevantes en seres humanos, entre los que figuran cepas bacterianas multi-resistentes (como MRSA, MRSE, VRE).

¿CUÁNDO SE UTILIZA?

La malla bactericida ACTISORB® PLUS 25 es adecuada como primer paso terapéutico en el tratamiento local de todo tipo de heridas crónicas o agudas que cierran por segunda o tercera intención, entre las que se encuentran:

- ❖ úlceras por presión
- ❖ úlceras de etiología venosa
- ❖ úlceras en pie diabético
- ❖ zonas donantes
- ❖ heridas traumáticas
- ❖ heridas quirúrgicas y posquirúrgicas
- ❖ carcinomas fungoides u otras heridas ulcerativas con riesgo de infección.

Los resultados de los diversos estudios clínicos realizados con ACTISORB® PLUS 25 evidencian y recomiendan su uso tanto para la limpieza y reducción de la carga bacteriana, como para el tratamiento local de la infección en las heridas anteriormente citadas, reduciendo considerablemente así los gastos y riesgos derivados de la morbi-mortalidad causada por dichas patologías.

Precauciones:

El hecho de no interactuar químicamente con la herida, dota a este producto de gran aceptación tisular y seguridad, no obstante, deberían considerarse las siguientes precauciones:

- ❖ Evitar su uso en paciente alérgico o con hipersensibilidad conocida al nylon.
- ❖ El apósito debe ser retirado en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a exámenes diagnósticos de Imágenes por Resonancia Magnética (IRM).
- ❖ Se debe evitar el contacto del producto con electrodos o geles conductores durante procedimientos de mediciones eléctricas, como un electrocardiograma (ECG) o un electroencefalograma (EEG).
- ❖ Debe considerarse el uso de tratamiento antimicrobiano sistémico en los casos de heridas con infección evidente o celulitis, o siempre que el paciente presente sintomatología sistémica no asociada a otro proceso.
- ❖ ACTISORB® PLUS 25 nunca debe ser recortado, para evitar el contacto directo del Carbón Activado y la Plata con la herida.

¿CÓMO SE UTILIZA?

A. Aplicación y retirada:

- ❖ Limpie la herida con suero fisiológico y desbride el tejido necrótico, si fuera necesario, de acuerdo a los protocolos estandarizados.
- ❖ Escoja el tamaño de apósito más apropiado
- ❖ Aplique directamente ACTISORB® PLUS 25 sobre el lecho de la herida
- ❖ ACTISORB® PLUS 25 puede ser colocado indistintamente por cualquiera de sus caras. Así mismo puede ser plegado fácilmente para ser introducido en heridas cavitadas o tunelizadas, pero nunca debe ser recortado.
- ❖ Humecte, si fuera necesario, el apósito ACTISORB® PLUS 25 con suero fisiológico o cualquier solución estéril para facilitar su manejo y adaptación al lecho de la herida, así como en heridas con bajo exudado para favorecer su mecanismo de acción y drenaje.
- ❖ Si se requiere, ACTISORB® PLUS 25 puede ser colocado sobre una malla no adherente. En este caso utilice una malla no adherente que permita el libre flujo de exudado y no bloquee el drenaje, como por ejemplo ADAPTIC® Malla No Adherente.
- ❖ Para optimizar la acción bactericida de ACTISORB® PLUS 25, se recomienda que aplique sobre él un apósito hidropolimérico absorbente que asegure las condiciones óptimas de cura en ambiente húmedo, como cualquier apósito de la familia TIELLE®.

B. Cambio de apósito

- ❖ La frecuencia de cambio del apósito depende de la condición del paciente y del nivel de exudado.
- ❖ Inicialmente, puede ser necesario cambiar el apósito entre 24 y 72 horas.
- ❖ ACTISORB® PLUS 25 puede permanecer en la herida hasta 7 días y puede ser aplicado bajo vendaje compresivo.
- ❖ Si la herida tiene un nivel de exudado bajo, humecte el apósito con solución salina fisiológica.
- ❖ Irrigue con suero fisiológico el lugar de la herida antes de la aplicación de un nuevo apósito.

ENVASADO:

Envase unitario estéril con etiquetado en el que figura:

- ❖ Denominación del artículo
- ❖ Método de esterilización utilizado
- ❖ Fecha de caducidad
- ❖ Número de lote
- ❖ Códigos EAN

METODO DE ESTERILIZACIÓN:

Radiación Gamma

CONSERVACIÓN:

Entre 0°C y 25°C

GARANTÍA DE CALIDAD:

Clase III. CE 0086

HABLEMOS...:

Para obtener más información sobre las ventajas del apósito ACTISORB® PLUS 25, póngase en contacto con su delegado de Systagenix o visite www.systagenix.es



CÓDIGO	MEDIDAS	PRESENTACIÓN	EMBALAJE EXTERNO
MAP065	6,5 cm x 9,5 cm	Caja de 10 Uds.	5 cajas (50 Uds.)
MAP105	10,5 cm x 10,5 cm	Caja de 10 Uds.	5 cajas (50 Uds.)
MAP190	10,5 cm x 19 cm	Caja de 10 Uds.	5 cajas (50 Uds.)
491936.3	10,5 cm x 10,5 cm	Caja de 3 Uds.	CON CUPÓN PRECINTO

Ficha técnica revisada en Octubre 2011