

Askina® Gel



ASKINA® Gel



Composición

Contiene un polímero de almidón modificado, glicerol y agua. La combinación entre la baja viscosidad y la alta adherencia, le confieren las mejores características de manejo. Esta especial característica, le permite ser fácilmente aplicado en todo tipo de heridas, incluso aquellas que presenten cavidades, garantizando su permanencia en el lugar de aplicación.

Composición %


Descripción	%
Agua Purificada	>80
EDTA Disodica	<1
Glicerina	5 - 15
Metilparabeno	<0.5
Sorbitol	<5
Carbopol 940	<2
Imidazolidinil Urea	<0.5
Aloe vera Gel	1 - 2
Allantoina	<0.5
Trietanolamina	<2

Descripción

Hidrogel incoloro, translúcido y estéril que proporciona un equilibrio óptimo entre hidratación y absorción. Desbridante autolítico de lesiones necróticas.

Indicaciones

Mantiene la humedad en el entorno de la lesión favoreciendo la granulación y la reepitelización. Dependiendo de las condiciones de la lesión, actúa rehidratando el tejido necrótico seco para estimular el desbridamiento de las lesiones secas, o absorbiendo el exudado de la lesión.

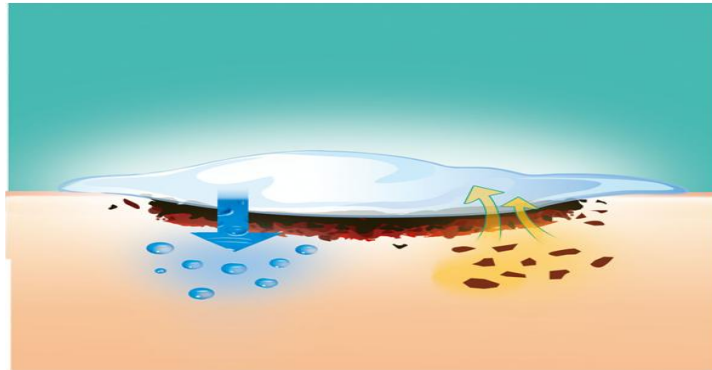

Puede ser utilizado en el cuidado de cualquier tipo de herida, independientemente de la fase del proceso de cicatrización en la que se encuentre, estando especialmente indicado en lesiones necróticas y esfaceladas, bien de carácter seco o exudativo, así como, aportando la humedad necesaria para favorecer el proceso de cicatrización.

Compatible con todos los productos de cura en ambiente húmedo (CAH).

Instrucciones de Utilización

Askina® Gel es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

Se presenta en tubos individuales de plástico, dispensables en cajas de 5 envases. Cada tubo contiene 15 gramos de gel y están diseñados para un solo uso (sistema monodosis). Su boquilla ha sido diseñada para acceder fácilmente al lecho de la lesión.

Puede ser aplicado en lesiones con signos clínicos de infección, bajo supervisión médica.

- Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaína) o solución salina en su defecto.
- Manteniendo la boquilla apartada de la superficie de la lesión, apriete el tubo con suavidad y aplique el gel a toda la lesión, en un grosor aproximado de 5mm.
- Cubra la lesión con un apósito secundario adecuado.

El envase proporciona gran comodidad de uso, incluso con una sola mano, así como el aprovechamiento total de la dosificación del producto y aplicación de forma precisa en la forma deseada.



Condiciones de conservación

Consérvese en lugar seco, a menos de 25°C

Presentaciones



Askina Gel 15 g

c/5 unidades

Código Braun: 001419SES

Marca CE: 0086

B|BRAUN