

# UrgoClean



## Apósito hidrodetersivo lípido coloide microadherente

TAMAÑOS	U/C	C.N
10x10 cm	10	161444.5
15x15 cm	10	161445.2
15x20 cm	10	161446.9
4x50 cm	5	161920.4

## DESCRIPCIÓN

UrgoClean es la primera gama de apósitos compuesta de fibras hidrodetersivas resistentes, de alto poder de absorción, principalmente indicada en el tratamiento de heridas exudativas en el fase de desbridamiento (necrosis húmeda).

Gracias a su forma compresa y a su forma mecha, UrgoClean está indicado tanto para las heridas planas o tuneladas (úlceras, úlceras por presión, heridas de pie diabético) como para las heridas cavitadas o anfractuosas.

UrgoClean es fruto de la tecnología lípido-coloide micro-adherente, innovación de Laboratorios Urgo.

**PRESENTACIÓN:** Acondicionamiento en sobre individual estéril listo para su uso.

**MODO DE ESTERILIZACIÓN:** Radio-esterilización.

Urgoclean compresa está compuesto de fibras hidro-detersivas, absorbentes y gelificantes están constituidas por:

1. fibras recubierta de polímeros de poliacrilato con propiedades de absorción y de gelificación al contacto con los exudados.
2. un núcleo acrílico, que garantiza una estructura resistente una vez gelificada, para que la compresa pueda ser retirada integralmente, sin residuos ni riesgo de ruptura.

La compresa hidro-detersiva de UrgoClean está enducida con una matriz lípido-coloide micro-adherente destinada a estar en contacto con la herida y con la piel peri-lesional para facilitar el posicionamiento de la compresa y garantizar su mantenimiento alrededor de la herida.

UrgoClean mecha está constituida de fibras hidro-detersivas de alto nivel de absorción y cohesión.

Estas fibras absorbentes y gelificantes están compuestas de polímeros de poliacrilato alrededor de un núcleo acrílico.

Gracias a su gran conformabilidad y a su micro-adherencia, UrgoClean se adapta perfectamente a la forma y a las irregularidades de la herida.

## PROPIEDADES

En contacto con los exudados, las fibras hidro-detersivas se gelifican y fijan con una alta afinidad los residuos fibrinosos de la herida.

Estos residuos serán entonces absorbidos y retenidos por la estructura del apósito para ser más fácilmente eliminados.

La gelificación de las fibras de UrgoClean permite mantener un medio húmedo favorable a la cicatrización de las zonas ya sometidas a desbridamiento sin riesgo de maceración de los bordes gracias a las propiedades de absorción vertical, sin difusión lateral del apósito.

La resistencia de las fibras de la gama UrgoClean permite una retirada monobloc (en una sola pieza) del apósito, sin dejar residuos en el seno de la herida.

La presencia de la TLC garantiza una retirada indolora para el paciente y no traumática para la herida y sobre todo, un respeto de la piel peri-lesional.

La compresa UrgoClean está indicada desde la fase de desbridamiento en las heridas exudativas crónicas (úlceras de pierna, úlceras por presión, ulceraciones del pie diabético de tipo mal perforante plantar) y en las heridas potencialmente fibrinosas : heridas agudas (quemaduras, dermoabrasiones, heridas traumáticas), heridas post-operatorias, heridas oncológicas.

La mecha UrgoClean está indicada desde la fase de desbridamiento en las heridas exudativas de difícil localización (heridas anfractuosas, heridas cavitadas...) crónicas (úlceras de pierna, úlceras por presión, pie diabético de tipo mal perforante plantar) y agudas (quemaduras, dermoabrasiones, heridas traumáticas), heridas post-operatorias, heridas quirúrgicas, heridas oncológicas.

## INDICACIONES

Urgoclean está indicado para el desbridamiento de todo tipo de heridas exudativas con fibrina.

## CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

### MODO DE EMPLEO:

- Retirar las aletas de protección.
- Aplicar el apósito Urgoclean sobre la herida, o en el caso de la mecha introducirla en la herida cavitada.
- Aplicar un apósito secundario o bien una banda de fijación si fuera necesario

Renovación del apósito:

- La renovación del apósito Urgoclean se hará cada 1 a 2 días, en función del exudado, y podrá ser más espaciada en función de la herida tratada y de su evolución.

### PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- Gracias a su carácter no oclusivo, UrgoClean puede ser utilizado sobre una herida colonizada, bajo estricta vigilancia médica.
- No asociar UrgoClean al peróxido de hidrógeno (Agua oxigenada), ni a antisépticos de la familia de los organo-mercuriales ni a la hexamidina.
- No re-esterilizar el apósito o la sonda
- Eliminar toda parte no utilizada del apósito
- Verificar la integridad del protector de esterilidad antes de su uso
- Almacenar el apósito UrgoClean horizontalmente, al abrigo de la humedad y del calor (temperatura inferior a 25°C).
- Proteger de la luz.

## ESTATUS REGLAMENTARIO

- Producto sanitario de clase IIb.