

Cutimed® PROTECT Crema



**SIN
LÁTEX**
EN LA FÓRMULA

Barrera cutánea protectora.

Crema barrera que protege la piel de los fluidos corporales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Protege y mantiene la piel integra, formando una barrera cutánea protectora de larga duración.
- Altamente concentrado: una pequeña cantidad cubre gran extensión de piel
- Hidrata la piel evitando que se seque
- No oclusivo: permite la transpiración de la piel.
- Se extiende con facilidad y se absorbe rápidamente.
- Seca rápidamente
- No deja residuos grasos en la piel. No es pegajoso al tacto.
- No contiene alcohol ni perfume: no sensibilizante, no irritante.
- Elevada tolerancia cutánea, no citotóxico
- Solución homogénea
- La presentación en tubo permite provechar el 98% del producto
- Impermeable, resiste los lavados de forma temporal
- Permite el uso concomitante de productos adhesivos sin riesgo de desprendimiento

INDICACIONES

Protección de áreas extensas de piel intacta frente a la maceración y la irritación causada por la incontinencia urinaria y/o fecal. Prevención de la dermatitis del pañal.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en presencia de infección o en caso de sensibilidad alérgica conocida a alguno de los ingredientes.

PRESENTACIÓN

Tubo en 2 formatos diferentes (28g y 90g)
La caja tiene la marca CE y código de barras.

ESTERILIDAD

El producto se suministra estéril, esterilizado con rayos gama. La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11137:2015 y en pleno cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42CEE y la norma UNE EN 556.

COMPOSICIÓN

Agua purificada, Ethylhexyl Isononanoate, Disiloxane, Polyisobutylene, VP Eicosene Copolymer, Hydroxyethyl Acrylate / Sodium Acryloyl Dimethyl Taurate Copolymer, Butylene Glycol, Oleth-3 Phosphate, Phenoxyethanol, Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer, Allantoin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA.
No contiene derivados vegetales



RECOMENDACIONES/ PRECAUCIONES DE USO

Si el estado de la piel no mejora en 7 días (o empeora), consultar con un médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Sólo para uso externo. En caso de ingestión consultar un médico. Evitar el contacto con los ojos. Cutimed® PROTECT Cream puede aumentar la adherencia de algunos productos adhesivos

PRESENTACIÓN

Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72652-00	Tubo de 28g	1 tubo (*)	12 tubos	12 cajas	-	4042809216653	4042809216660
72652-03	Tubo de 90g	12 tubos	48 tubos	4 cajas	4042809516418	4042809386332	4042809404258

(*) en envase individual

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE I, no estéril BSN medical SLU ISO 9001:2015 ISO 13485:2016			 1 año   25°C	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburgo. Alemania Distribuidor BSN medical SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación



Producto esterilizado con rayos gamma



Temperatura de almacenamiento



Fabricante



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar

BSN medical SLU

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
 Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
 B62495882

www.bsnmedical.com.es

Cutimed® PROTECT Film



**SIN
LÁTEX**
EN LA FÓRMULA



Barrera cutánea protectora frente factores externos y la irritación causada fluidos corporales

Barrera cutánea en spray o aplicador en esponja monodosis que protege la piel de los fluidos corporales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Solución polimérica que forma una película **barrera uniforme** cuando se aplica sobre la piel.
- Garantiza una **barrea cutánea** frente a la humedad de **larga duración**: hasta 96 horas
- **Permeable al aire y al vapor de agua (no oclusivo)**: permite la transpiración de la piel
- Previene la pérdida transepidérmica de agua, evitando el desecamiento de la piel
- **Seca rápidamente** (30 segundos).
- Una vez seco **no es pegajoso al tacto**.
- **Forma una capa flexible**: se adapta al movimiento natural de la piel y mantiene su efectividad sin agrietarse
- **No reduce la adhesión de los productos adhesivos**. Puede utilizarse en combinación con apósitos
- **No contiene alcohol ni perfume**: su aplicación no escuece/irrita, y evita el riesgo de sensibilizaciones
- En pliegues cutáneos no se produce adhesión piel con piel
- El formato en spray permite cubrir y proteger, fácil y rápidamente, áreas extensas de piel perilesional mediante la formación de una capa protectora homogénea
- El aplicador en esponja permite una aplicación fácil y precisa, para proteger los márgenes de la lesión.

INDICACIONES

Barrera primaria para proteger la piel intacta o dañada frente:

- Incontinencia urinaria y/o fecal
- Jugos gástricos, exudado o sudoración
- Uso de material adhesivo (apósitos, esparadrapos...)
- Fricción y fuerzas de cizallamiento

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en presencia de infección.

No utilizar como única barrera protectora en aquellas circunstancias que se requiera protección frente contaminación bacteriana, en zonas de inserción (p.ej. catéteres para terapia intravenosa) o heridas de espesor total o parcial.

PRESENTACIÓN

Presentación en spray: 28ml

Aplicador en esponja: aplicador de 1ml y 3ml

La caja tiene la marca CE y código de barras.

COMPOSICIÓN

Solución barrera en film: Disiloxano (HMDS), Copolímero acrílico. La aplicación en esponja está provista de un soporte de polipropileno blanco con una espuma de poliuretano aplicada en su extremo.

RECOMENDACIONES/ PRECAUCIONES DE USO

En caso de enrojecimiento cutáneo o si aparecieran u otros signos de irritación, discontinuar su uso y consultar con un médico.

El uso de otros productos barrera, pomadas, ungüentos, cremas o lociones puede tener un efecto adverso significativo en la eficacia de Cutimed® PROTECT Film

Cutimed® PROTECT Film en spray está formado por un líquido altamente inflamable; sólo debe utilizarse en áreas bien ventiladas y lejos de llamas o fuentes de ignición. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar si el envase estuviera abierto o dañado.

El contenido del spray es estéril hasta el primer uso.

No aplicar Cutimed® PROTECT Film en spray en el lecho de la herida

DURABILIDAD

Dejar secar Cutimed® PROTECT Film aproximadamente por 30 segundos

- Como protección debajo de esparadrapos o apósitos: reaplicar en cada cambio de apósito ya que la mayoría de adhesivos eliminarán la película protectora
- Como protección frente a fluidos corporales, orina, heces, etc: se recomienda aplicar el producto cada 24-72 horas dependiendo de la frecuencia de lavado. En casos extremos (p.ej.: diarrea crónica) que impliquen lavados muy frecuentes, puede ser necesario reaplicar el producto con mayor frecuencia (cada 12-24 horas).








ESTERILIDAD

El producto se suministra estéril, esterilizado con rayos gama. La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11137:2015 y en pleno cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42CEE y la norma UNE EN 556.

PRESENTACIÓN

Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72653-00	Spray de 28ml	1 un (*)	12 un	12 un	-	4042809386349	4042809386356
72653-01	Spray de 28ml	1 caja con 12 un	48 un	4 cajas	4042809516432	4042809386370	4042809404241
72654-00	Aplicador en esponja - 1ml	1 caja de 5 un	120 un	24 cajas	4042809516517	4042809386387	4042809386394
72654-01	Aplicador en esponja - 1ml	1 caja de 25 un	150 un	6 cajas	4042809516456	4042809386400	4042809386417
72654-02	Aplicador en esponja - 3ml	1 caja de 5 un	100 un	20 cajas	4042809516531	4042809386424	4042809386431
72654-03	Aplicador en esponja - 3ml	1 caja de 25 un	100 un	4 cajas	4042809516579	4042809386448	4042809386455


(*) Envase individual

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase CE I, estéril BSN medical SLU ISO 9001:2008 			 3 años   25°C	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburgo. Alemania Distribuidor BSN medical SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación

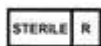

Producto esterilizado con rayos gamma



Temperatura de almacenamiento



Fabricante



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar

BSN medical SLU

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
 Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
 B62495882

www.bsnmedical.com.es