




Apósito de PVA para la **captura y bloqueo** de fluidos y bacterias

- Gran capacidad de retención para prevenir fugas de exudado y maceración
- Gracias a su alta resistencia a la tracción, se retira de una sola pieza
- Combina la capacidad de **captura y bloqueo** del exudado
- **Encapsula** el exudado
- Muy absorbente, también bajo terapia de compresión
- Suave y adaptable lo que facilita su aplicación

Alta capacidad de retención

- Previene las fugas
- Previene la maceración

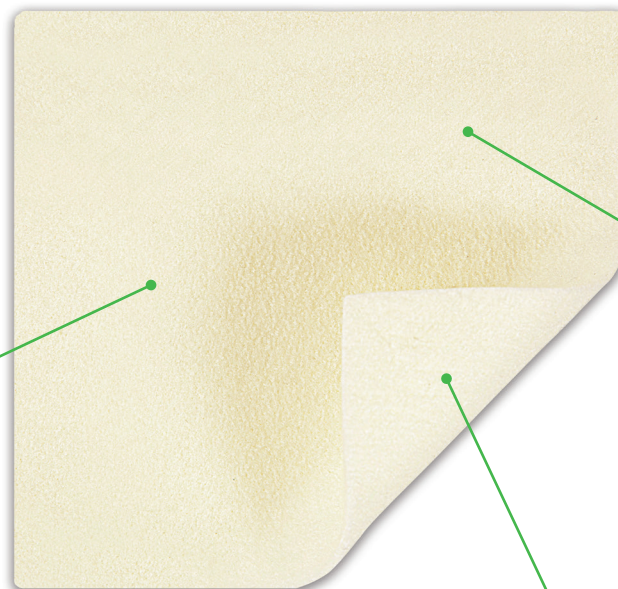

Tecnología Hydrolock®


- Excelente resistencia a la tracción
- Retirada del apósito de una sola pieza
- Ahorro de tiempo de enfermería y aumento de la comodidad del paciente

100% polivinilo de alcohol (PVA)

Forma de utilización de Exufiber



1. Limpiar la herida con suero salino o agua. Secar la piel perilesional.

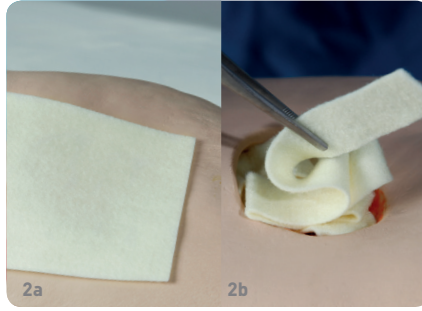

2a. Aplicar Exufiber sobre la herida. El apósito debe cubrir toda la herida y solaparse con la piel perilesional al menos 1-2 cm en las medidas más pequeñas y 5 cm en las grandes.

2b. Rellena la herida con la cinta o sábana dejando espacio para la dilatación del apósito.



3. Fijar con un apósito secundario apropiado. Se puede usar terapia de compresión conjuntamente con Exufiber.

Cómo funciona Exufiber

Exufiber es un apósito de PVL para la **captura y bloqueo** de fluidos y bacterias para el tratamiento de heridas contaminadas. Consigue **encapsular** el exudado gracias a la composición de polivinilo de alcohol y a la tecnología patentada Hydrolock®.

Gracias a la tecnología Hydrolock®, las fibras de Polivinilo de Alcohol (PVA) de Exufiber están entrelazadas en todas direcciones y fijadas mecánicamente entre sí, lo que ofrece una alta integridad del apósito también en mojado.

La tecnología Hydrolock® **bloquea** el exudado eliminando los espacios muertos dentro de sus fibras, permitiendo minimizar la libertad de fluidos, lo que obtiene una **retención superior**.

Precauciones

Todas las heridas deben examinarse con frecuencia. En caso de signos de infección clínica, consulte al profesional sanitario para un tratamiento adecuado. Exufiber no está indicado en heridas secas o en quemaduras de espesor total.

Para facilitar la retirada se puede humedecer el apósito de acuerdo con las políticas locales (ej. con suero salino o agua esteril), una vez humedecido la retirada será cómoda y suave.

Beneficios de Exufiber

- Alta resistencia a la tracción para conseguir la retirada de una pieza
- Gran capacidad de retención. **Bloquea** el exudado previniendo las fugas y la maceración
- Absorbe y retiene el exudado, la sangre y las bacterias
- Suave y adaptable lo que facilita su aplicación

Indicaciones

Exufiber está indicado en un amplio rango de heridas con niveles de exudado de moderado a muy alto.

Especialmente recomendado para el tratamiento de úlceras venosas.

También indicado para úlceras por presión, heridas cavitadas, úlceras de pie diabético, heridas quirúrgicas, sinus pilonidal.



Presentaciones Exufiber (Estéril)

Nº. Ref.	Tamaño cm.	Unids./ Env.	Unids./ TRP.
603300	5x5	10	40
603301	10x10	10	60
603302	15x15	10	60
603303	20x30	5	20
603308	2x45	5	20

Formatos disponibles tanto para heridas planas, como cavitadas.