



UrgoClean Ag



EL ÚNICO APÓSITO DE PLATA CON PODER DE LIMPIEZA PARA COMBATIR LA INFECCIÓN LOCAL



PARA EL TRATAMIENTO LOCAL DE HERIDAS CRÓNICAS Y AGUDAS EXUDATIVAS CON RIESGO O SIGNOS DE INFECCIÓN LOCAL, DESDE LA FASE DE DESBRIDAMIENTO




Presentación en envase individual estéril almacenados por cajas, listo para usar

Tamaño	U/C	Referencia	C.N.
10x10*	3*	551744	480269.6
15x15*	3*	551745	480277.1
6x6	10	551554	178564.0
10x10	10	551555	178565.7
15x15	10	551556	178567.1

*Formatos financiados por el SNS



UrgoClean Ag

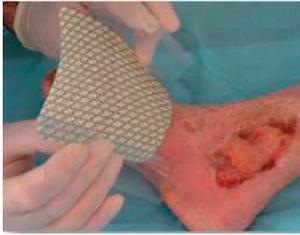

DESCRIPCIÓN

- **UrgoClean Ag** se presenta bajo la forma de un apósito estéril, no tejido, de fibras poliabsorbentes hidrodetersivas (poliacrilato) de alto nivel de absorción y cohesión.
- El apósito hidrodetersivo está recubierto con una matriz cicatrizante microadherente (TLC: Tecnología Lípido-Coloide) impregnada con Plata. Esta TLC-Ag proporciona una acción antibacteriana y gelifica fácilmente, ayudando de esta

manera al drenaje del tejido desvitalizado. Además, permite una fácil colocación y retirada del apósito.

- Este apósito usa la termoconexión para unir las fibras de poliacrilato, que están en un plano paralelo a la superficie de la herida según un patrón estructurado, las cuales confieren a **UrgoClean Ag** sus propiedades específicas de limpieza de todos los residuos de la herida, así como su resistencia a la tracción.

PROPIEDADES

- En contacto con el exudado de la herida, la matriz TLC-Ag forma un gel que conduce a un medio húmedo favorable para el proceso de cicatrización de la herida.
- Los iones Ag⁺ confieren a **UrgoClean Ag** una actividad antibacteriana que permite reducir la carga bacteriana local; tiene un amplio espectro de actividad antimicrobiana que cubre a bacterias gram-negativas, gram-positivas y ciertas levaduras. Es particularmente efectivo contra *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* y *Pseudomonas aeruginosa* (bacilo piocianico) que son los gérmenes más frecuentemente responsables de las heridas localmente infectadas. **UrgoClean Ag** reduce la población bacteriana de un biofilm en 24 horas, y durante 7 días (comprobado "in vitro" sobre biofilm de *S. aureus* y *P. aeruginosa*).

- Al mismo tiempo, las fibras poliabsorbentes absorben el exudado y forman un gel. Estas fibras poliabsorbentes fijan el tejido desvitalizado con alta afinidad, lo absorben y lo drenan para así ayudar a su eliminación (desbridamiento autolítico). Al llevarse el exudado, el tejido desvitalizado y las bacterias, **UrgoClean Ag** mantiene la herida limpia de todos los componentes que pueden favorecer la proliferación bacteriana y la formación de biofilm, permitiendo además una acción más efectiva de los iones plata sobre el lecho de la herida.
- Además el producto puede retirarse en una sola pieza gracias a la resistencia a la tracción de las fibras poliabsorbentes.
- Por último, el gel formado no se pega a la herida, lo que permite una fácil retirada del apósito de manera atraumática e indolora para el paciente.

INDICACIONES

- **UrgoClean Ag** está indicado en el tratamiento local de úlceras exudativas crónicas (úlceras de pierna, úlceras por presión, úlceras de pie diabético) y

agudas (quemaduras, heridas traumáticas, heridas quirúrgicas,) con riesgo o signos de infección local, desde la fase de desbridamiento.

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN DE LA HERIDA:

- Limpiar la herida usando suero fisiológico. Si se ha utilizado previamente un antiséptico (con excepción de los antisépticos contraindicados), enjuagar cuidadosamente la herida con suero fisiológico antes de aplicar el apósito.
- La utilización de **UrgoClean Ag** no dispensa de la necesidad de un desbridamiento mecánico, cuando éste sea necesario.
- En el transcurso de la retirada de tejido desvitalizado, puede presentarse un agrandamiento de la herida. Esto es debido a la eliminación efectiva de este tejido desvitalizado.

APLICACIÓN DEL APÓSITO:

- Retirar las aletas de protección.
- Aplicar la cara microadherente de **UrgoClean Ag** a la herida y sus contornos.
- **UrgoClean Ag** puede ser recortado con tijeras estériles para adaptar, si fuese necesario, el tamaño del apósito al de la herida.
- Si fuese necesario, recubrir **UrgoClean Ag** con un apósito secundario apropiado a la localización y al nivel de exudado de la herida.
- Mantenerlo en su sitio usando una venda de compresión.
- Aplicar un vendaje de compresión cuando sea prescrito.

CAMBIO DEL APÓSITO:

- Los apósitos **UrgoClean Ag** deben ser renovados cada 1 a 2 días durante la fase de mayor retirada de tejido desvitalizado, y después con la frecuencia requerida (hasta cada 7 días) según el volumen de los exudados y a la evolución clínica de la herida.
- La duración máxima recomendada del tratamiento con **UrgoClean Ag** es de un mes.

PRECAUCIONES:

- El tratamiento con **UrgoClean Ag** debe realizarse bajo supervisión médica.
- El uso de este apósito no excluye la necesidad de un tratamiento antibacteriano sistémico apropiado en heridas infectadas, en línea con la política local.

- La matriz microadherente cicatrizante con plata (TLC-Ag) de **UrgoClean Ag** se adhiere a los guantes quirúrgicos de látex. Se recomienda manipular el apósito evitando el contacto con la cara microadherente o utilizando pinzas estériles.
- No se recomienda la utilización concomitante con otros tratamientos locales.
- Evitar el contacto con electrodos o geles conductores durante las mediciones electrónicas p.e. EEG y ECG.
- Los profesionales sanitarios deben tener en cuenta el hecho de que hay muy poca documentación sobre la utilización prolongada y repetida de apósitos con plata, particularmente en niños y recién nacidos.
- En ausencia de datos clínicos específicos, su uso en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, no está recomendado.
- Envase individual estéril, de un solo uso. La reutilización de un producto de un solo uso, puede provocar riesgos de infección.
- Verificar la integridad del protector de esterilidad antes de su uso.
- No re-esterilizar.
- Para su eliminación, desechar según los protocolos habituales. Desechar toda parte no utilizada del apósito.

CONTRAINDICACIONES:

- Sensibilización conocida a la plata.
- **UrgoClean Ag** no es adecuado para usar como esponja quirúrgica en lesiones muy hemorrágicas.
- No usar **UrgoClean Ag** en combinación con peróxido de hidrógeno, antisépticos órgano-mercuriales o hexamidina.
- No usar en pacientes sometidos a exámenes de imágenes de resonancia magnética.